



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
ENGELSİZ BİLGİ MERKEZİ
EKRAN BÜYÜTME CİHAZI
KULLANIM TALİMATI

Doküman No : İÜ/KDDB/TL-015
İlk Yayın Tarihi : 30.12.2016
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 2

1. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Engelsiz Bilgi Merkezi Personeli sorumludur.

2. TANIMLAR

-

3. UYGULAMA

1. Cihazı monitörün üzerindeki Power tuşuna basarak açınız.
2. Yakınlaştırmak için + ve - tuşlarını kullanınız.
3. Mode tuşuna basarak renk ve büyütme arasında tercih yapınız.
4. Renk açma ve koyulaştırma işlemini ise monitörün sağındaki tekerlekten gerçekleştiriniz.
5. Kağıdı cihazın kayar yüzeyinin üstüne koyunuz. Bu yüzeyi merceğin altına gelecek şekilde yerleştiriniz.
6. Cihazın kullanımı bitince Power tuşundan kapatınız.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

-

HAZIRLAYAN
BİRİM
DOKÜMANTASYON
SORUMLUSU

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL
BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ

ONAYLAYAN
KALİTE KOORDİNATÖRÜ



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
ENGELSİZ BİLGİ MERKEZİ
EKRAN BÜYÜTME CİHAZI
KULLANIM TALİMATI

Doküman No : İÜ/KDDB/TL-015
İlk Yayın Tarihi : 30.12.2016
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 2 / 2

5. REVİZYON TAKİP

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA

Kontrollü Kopya

HAZIRLAYAN
BİRİM
DOKÜMANTASYON
SORUMLUSU

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL
BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ

ONAYLAYAN
KALİTE KOORDİNATÖRÜ