



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
TRANSFÜZYON MERKEZİ SANTRİFÜJ KULLANMA TALİMATI

Doküman No : OE-TM-PR-001/TL-008
İlk Yayın Tarihi : 05.02.2019
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Transfüzyon merkezinde santrifüj kullanımını için bir yöntem belirlemektir.

2. Kapsam

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Transfüzyon Merkezini kapsar.

3. Sorumlular

Transfüzyon Merkezi tüm teknik elemanları.

4. Uygulama

- Cihazın arka kısmında bulunan açma kapama butonu “ ON “ konumuna getirilir.
- Elektrik kesintilerinde veya cihaz yerinden kaldırılacaksa, açma kapama butonu mutlaka “ OFF “ konumuna getirilir.
- Cihazın işlem süresi sabittir ve 5 dakikadır. Santrifüj süresi ön panelinde bulunan küçük ekrandan takip edilebilir. Santrifüjün hızı ise “rpm” butonuna basılarak değiştirilebilir. Seçilmek istenen hızı bulana kadar butona basılır ve ön panelde bulunan küçük ekrandan hız takip edilir.
- Santrifüj edilecek tüp veya kasetler cihaza mutlaka karşılıklı olarak ve birbirini dengeleyecek şekilde yerleştirilir.
- Tüpler yerleştirildikten sonra START butonuna basılarak cihaz çalıştırılır.
- Santrifüj çalışırken veya tamamen duruncaya kadar kapağı kesinlikle açılmaz.
- Santrifüj süresi dolduğunda cihaz sesli uyarı verir. START butonuna basılarak cihazın kapağı açılarak santrifüj edilmiş kartlar cihazdan çıkartılır.
- Sesli uyarı verdikten bir süre sonra kapak açılarak içindekiler çıkarılmaz ise, kapak kendiliğinden otomatik olarak kapanır. Böyle bir durumda, kapağın açılması “ STOP “ düğmesine basılarak sağlanır.

HAZIRLAYAN:

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN:

ONAYLAYAN:

SÜREÇ SORUMLUSU

HASTANE KALİTE TEMSİLCİSİ

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ/BAŞHEKİM