



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
TRANSFÜZYON MERKEZİ İNKÜBATÖR KULLANMA TALİMATI

Doküman No : OE-TM-PR-001/TL-009
İlk Yayın Tarihi : 05.02.2019
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Transfüzyon merkezinde inkübatör kullanımı için bir yöntem belirlemektir.

2. Kapsam

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Transfüzyon Merkezini kapsar.

3. Sorumlular

Transfüzyon Merkezi tüm teknik elemanları.

4. Uygulama

- Cihazın arka kısmında bulunan açma kapama butonu "ON" konumuna getirilir.
- Cihaz içinde ve üzerinde bulunan termometrelerin her ikisinde göstergesi 37 °C'yi gösterdiğinde cihaz kullanıma uygun durumdadır.
- Elektrik kesintilerinde veya cihaz yerinden kaldırılacaksa, mutlaka açma kapama butonu "OFF" konumuna getirilmelidir.
- İnkübatör her birinde 16 bölme bulunan iki kısımdan oluşmaktadır. Kartlar cihaza dik olacak şekilde yerleştirilir.
- İnkübatör sıcaklığı sabittir. Ancak süresi değiştirilebilir.
- İnkübatör süresi değiştirilmek istendiğinde; ön panelde bulunan aşağı okuna basılarak süre azaltılır veya yukarı okuna basılarak süre artırılır.
- İnkübatör süresi ve sıcaklığı ön panelde bulunan küçük ekrandan takip edilebilir.
- Ayarlamalar tamamlandıktan sonra cihazın kapağı katılarak işlem ön panelde bulunan START butonuna basılarak inkübasyon başlatılır.
- İnkübatör süresi dolduğunda sesli uyarı verir. Sesli uyarıdan sonra "STOP" düğmesine basılarak uyarı kesilir, kapak açılarak içindeki kaset çıkarılır.

HAZIRLAYAN:

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN:

ONAYLAYAN:

SÜREÇ SORUMLUSU

HASTANE KALİTE TEMSİLCİSİ

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ/BAŞHEKİM