



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
TRANSFÜZYON MERKEZİ
CENTRON MARA SE 450 MODEL HORTUM KAPAMA CİHAZI
BASİT KULLANMA TALİMATI

Doküman No: OE-TM-PR-001/TL-012
İlk Yayın Tarihi : 05.02.2019
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Cetron Mara SE 450 model hortum kapama cihazının doğru çalışmasını sağlamak.

2. Kapsam

Transfüzyon Merkezi

3. Sorumlular

Transfüzyon Merkezi çalışanları

4. Uygulama

- 4.1. Cihaz elektrik kablosu ile şehir şebekesine bağlantısı yapılır.
- 4.2. BNC kablo ile hortum kapama maşasının cihazla bağlantısı yapılır.
- 4.3. Cihazın arkasında bulunan açma kapama düğmesinde cihaz açılır. (1 konumu açık, 0 konumu kapalı anlamına gelir)
- 4.4. Ön panelde cihazın açık olduğunu belirten mavi ışık yanar.
- 4.5. Bağlantısı yapılan hortum kapama maşasının kafa bölümünde açık olan ağız bölümüne hortum yerleştirilir maşanın kolu sıkılıp 1-2 saniye içinde hortum kapanmış olarak geri alınır.
- 4.6. Kesinlikle maşa ile boş şekilde kapatma işlemi yapılmaz, arasında hortum olması gerekir.

| HAZIRLAYAN | GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------|
| SÜREÇ SORUMLUSU | KALİTE TEMSİLCİSİ | ENSTİTÜ MÜDÜRÜ/BAŞHEKİM |