



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
TRANSFÜZYON MERKEZİ
CARD CENTRIFUGE KULLANMA TALİMATI

Doküman No: OE-TM-PR-001/TL-013
İlk Yayın Tarihi : 05.02.2019
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

KULLANIM HAZIRLIĞI

1. Across System Card Centrifuge, düz ve titreşim olmayan bir yüzeye konulur.
2. Voltaj kablosu şebeke hattına takılır.
3. Voltaj kablosu girişinin yanında bulunan kumanda düğmesini "I" konumuna getirilerek cihaza voltaj verilir.
4. Üst kapak cihaza voltaj verilip **KAPAK AÇMA** düğmesi ile açılabilir, bu işlemden önce kapağı zorlamayınız.

KULLANIM

1. Cihaza voltaj uygulandığında ekranda 990 RPM ve 9 dk. zaman ayarlanmış olarak görülür.
 2. "**KAPAK AÇMA**" (LİD) düğmesine basarak kapağın açılması sağlanır.
 3. Santrifüj rotorunu elle çevirerek dönüşün engellenmediğini ve godelerin rahat hareket ettiğini görünüz.
 4. Çalşılmış kartları santrifüj etmek için karşılıklı olarak godelere yerleştiriniz.
 5. Kartları godelere simetrik şekilde **1-13, 2-14, 3-15....** Gibi yerleştiriniz, tek sayılı çalışmalarda karşı godeye **denge kartı** koyunuz.
 6. Kartları godelere aynı yönde olacak şekilde yerleştiriniz.
- NOT: Kartların godeye tam oturduğunu kontrol ediniz.**
7. Santrifüj kapağını kapatınız.
 8. Ön panel ortadaki "**çalıştırma düğmesi**" (START)'ne basarak çalışmayı başlatınız aynı anda zaman göstergesi geri saymaya başlar.

ÇALIŞMANIN SONA ERDİRİLMESİ

1. Çalışma süresi dolduğunda cihaz sesli uyarı verecektir.
2. Cihaz çalışma sonunda sesli uyarı verdikten sonra kapak otomatik olarak açılır.
3. Santrifüjlenmiş kartları godelerden alınız.
4. Cihaz bir sonraki çalışmaya hazırdır.

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
SÜREÇ SORUMLUSU	KALİTE TEMSİLCİSİ	ENSTİTÜ MÜDÜRÜ/BAŞHEKİM