



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
TRANSFÜZYON MERKEZİ
CARD INCUBATOR KULLANMA TALİMATI

Doküman No: OE-TM-PR-001/TL-014
İlk Yayın Tarihi : 05.02.2019
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

KULLANIM HAZIRLIĞI

1. Across System Card Incubator, düz ve titreşim olmayan bir yüzeye konulur.
2. Voltaj kablosu şebeke hattına takılır.
3. Voltaj kablosu girişinin yanında bulunan kumanda düğmesini "I" konumuna getirilerek cihaza voltaj veriniz.

KULLANIM

1. Cihaza voltaj uygulandığında her iki ekranda da sıcaklık ve zaman değerleri görülür. Cihaz 37 °C ve 15 dk. ya ayarlanmıştır.
2. Sıcaklık değeri 37 °C de sabit olup, aşağı yukarı okları ile zamanı istediğiniz değere ayarlayabilirsiniz.
3. Üst kapağı kaldırarak çalışılmış kartları inkübe etmek için istediğiniz bloğun kart boşluklarına yerleştiriniz.
4. Kullandığınız bloğa göre **TIME 1 / TIME2** düğmesine basarak zamanı başlatınız.

ÇALIŞMANIN SONA ERDİRİLMESİ

1. Çalışma süresi dolduğunda cihaz sesli uyarı verecektir.
2. Kapağı kaldırdığınızda, kartlar rahat alınabilmesi için yukarı çıkacaktır.
3. Kartları alarak çalışmayı sonlandırınız.
4. Cihaz bir sonraki çalışmaya hazırdır.

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
SÜREÇ SORUMLUSU	KALİTE TEMSİLCİSİ	ENSTİTÜ MÜDÜRÜ/BAŞHEKİM