



## ANESTEZİ CİHAZI KULLANMA TALİMATI

Doküman No:OE-AMS-PR-001/ TL-008  
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017  
Revizyon No :00  
Revizyon Tarihi :  
Sayfa No : 1 / 1

### 1. Amaç

Anestezi cihazının doğru ve güvenli kullanımını sağlamak ve hastada oluşabilecek cihazla ilgili komplikasyonlarını önlemektir.

### 2. Kapsam

Ameliyathanede bulunan Drager Fabius GS marka anestezi cihazını kapsar.

### 3. Tanımlar

### 4. Sorumlular

Anestezi uzmanı ve teknisyeni

### 5. Uygulama

- Cihazın Oksijen alışıını sağlayan jakı merkezi sistemin Oksijen jakına takın.
- Cihazın Azot alışıını sağlayan jakı merkezi sistemin Azot jakına takın.
- Cihazın fişini takın.
- Cihazdan hastaya gaz giriş çıkışıını sağlayan hortum düzeneği uygun bir şekilde yerleştirin.(yönü cihaza doğru olan hortum girişi ekspiryum için, cihazdan dışarı ok işareti olan hortum girişi inspiryumunu sağlar,üzerinde balon işareti olan hortum girişi manuel ventilasyonu sağlar)
- Cihazı, arkasındaki siyah açma düğmesi ile açın.
- Flowmetrelere O<sub>2</sub> (Oksijen)ve N<sub>2</sub>O (Azot) gazlarının gelip gelmediğini kontrol edin.
- Cihazın self test ve gaz kaçağı kalibrasyonu yapın.
- Balonu gaz kaçağı yönünden kontrol edin.
- Cihazın kanister soda – Lime ile dolu olmasına ve temiz olmasına dikkat edin.
- Vaparızörlerin inhalasyon ajanıyla dolu olmasına dikkat edin.
- Hastaya hava akışıını sağlayan hortumu bağlayın, doktorunuzun istediği ventilasyon modunun düğmesine, modu onaylamak için cihazın üzerindeki yuvarlak butona basın, modun üzerinde yanan sabit sarı ışık onaylandığını gösterecektir.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda stand-by konumunda bırakın.

### 6. İlgili Dökümanlar

#### 6.1. Drager Fabius GS Cihaz Kullanım Klavuzu

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Süreç Sorumlusu	Kalite Temsilcisi	Başhekim