



AMELİYATHANE MASASI KULLANMA TALİMATI

Doküman No:OE-AMS-PR-001/TL-005
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Ameliyat masasının doğru kullanılmasını sağlayarak ameliyat esnasında hasta pozisyonundan kaynaklı sorunları engellemek

2. Kapsam

Enstitümüz ameliyathanesinde buluna ameliyathane masasını kapsar.

3. Tanımlar

4. Sorumlular

Ameliyathane çalışanları.

5. Uygulama

5.1. Masayı düz pozisyonda bulundur. Kol tahtalarını ve siper demirini masaya tak. Masa sabitleme pedalını kontrol et.

5.2. Hastayı yukarı kaldırman gerekiyorsa alt taraftaki ayak pedalına kesik kesik bas. Aşağı indirmen gerekiyorsa ayak pedalından ayağını çekmeden bas.

5.3. Sağ kol ileri doğru itilip sağa çevrildiğinde sağ lateral pozisyon, sola çevrildiğinde sol lateral pozisyona getir.

5.4. Sağ kol geri çekilerek sağ yönde çevrilip baş aşağı pozisyona, sol yöne çevirip baş yukarı pozisyona getir.

5.5. Sol kol ileri doğru itilerek sağa çevirip ayak ve baş kısmını aşağı indir. Sola çevirip masayı düzelt.

5.6. Geriye doğru çekip sağa çevirip baş yukarı yap. Sola doğru çevirip baş aşağı yap.(Yalnız baş oynar)

HAZIRLAYAN

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Süreç Sorumlusu

Kalite Temsilcisi

Başhekim