



KOTER CİHAZI KULLANMA TALİMATI

Doküman No: OE-AMS-PR-001 /TL-006
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Monopolar ve Bipolar Koter cihazının doğru ve güvenli kullanımını sağlamak

2. Kapsam

Enstitümüz ameliyathanesinde bulunan Monopolar ve Bipolar Koter cihazını kapsar.

3. Tanımlar

4. Sorumlular

Tüm ameliyathane çalışanları.

5. Uygulama

5.1. Fişini prize tak

5.2. **Monopolar koter** için çalıştırma düğmesini aç.

5.3. Koter plağını hastanın operasyon bölgesine yakın olmayan, kılsız, doğru boyda, temiz ve kuru alana ,kalın kas yığınlarının üzerine, iyi temas edecek şekilde yerleştirilmelidir.

5.4. Koter ucunu cihaza yerleştir.

5.5. İşlem bittikten sonra cihazı kapat.

5.6. **Bipolar koter** için çalıştırma düğmesini aç.

5.7. Koter ayağını kullanıcıya ver.

5.8. Bipolar koter ucunu cihaza yerleştir.

5.9. İşlem bittikten sonra cihazı kapat.

HAZIRLAYAN

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Süreç Sorumlusu

Kalite Temsilcisi

Başhekim