



AMELİYATHANE LAMBASI KULLANMA TALİMATI

Doküman No: OE-AMS-PR-001 /TL-007
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Ameliyathane lambasının uygun şekilde kullanılmasını sağlamak.

2. Kapsam

Enstitümüz ameliyathanesinde bulunan ameliyathane lambasını kapsar.

3. Tanımlar

4. Sorumlular

Ameliyathane çalışanları

5. Uygulama

5.1. Lamba ışık düğmesini aç.

5.2. Lamba çemberini hastanın ameliyat bölgesini gösterecek şekilde çevir (ameliyat sırasında ise steril lamba sapı ile hazırla).

5.3. Lamba sapı takılan yerde sağa doğru çevirme yaparak sabitle.

5.4. Ameliyat bittikten sonra gereken temizliği yap, tekrar yukarıya kaldır ve lamba düğmelerini kapat.

HAZIRLAYAN

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Süreç Sorumlusu

Kalite Temsilcisi

Başhekim