



## ASPIRATÖR KULLANMA TALİMATI

Doküman No: OE-AMS-PR-001 /TL-009  
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017  
Revizyon No :00  
Revizyon Tarihi :  
Sayfa No : 1 / 1

### 1. Amaç

Ameliyat sırasında ve sonrasında oluşabilecek aksaklıkları engellemek

### 2. Kapsam

Enstitümüz ameliyathanesinde bulunan aspiratörü kapsar.

### 3. Tanımlar

### 4. Sorumlular

Ameliyathane çalışanları

### 5. Uygulama

5.1. Fişini prize tak

5.2. Çalıştırma düğmesini çevir

5.3. Kavanoz kapaklarını kontrol et

5.4. Vakum ayarlarını kontrol et

5.5. Aspiratör hortumunu tak

5.6. Kullanıcıya ver

5.7. İşlem bittikten sonra hortumu çıkar

5.8. Cihazı kapat, fişi prizden çıkar

5.9. Kavanozları boşalt, yıka, temizle yerleştir

HAZIRLAYAN

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Süreç Sorumlusu

Kalite Temsilcisi

Başhekim