



## DEFİBRİLATÖR KULLANMA TALİMATI

Doküman No: OE-AMS-PR-001 /TL-010  
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017  
Revizyon No :00  
Revizyon Tarihi :  
Sayfa No : 1 / 1

### 1. Amaç

Cihazın doğru ve güvenli kullanılmasını sağlamak.

### 2. Kapsam

Ameliyathanede bulunan defibrilatörü kapsar.

### 3. Tanımlar

### 4. Sorumlular

Anestezi hekimi, anestezi teknikeri

### 5. Uygulama

5.1. Cihazın fişinin takılı veya bataryasının dolu olduğundan emin olun.

5.2. on/off düğmesinden cihazı açın.

5.3. Elektrotları ve kabloları, üzerindeki işaretlere uygun olarak hastanın üzerine yerleştir (Kırmızı-R:sağ üst göğüs, sarı-L:sol üst göğüs, yeşil-F:sol göğüs altı), cihaz doktorun istediği joule getiriniz.(kardiyoversiyon yapılacaksa doktora sorarak sync düğmesine basınız)

5.4. Cihazın kaşıklarının üstüne jel sür

5.5. Paddle'ı apex yazan kaşığın üzerindeki tuşa basarak şarz edin.

5.6. Şarz olduktan sonra hastaya şok uygulayın.

5.7. Uygulama sırasında kimsenin hastaya dokunmadığından ve oksijen kaynağının kapalı olduğundan emin olun

5.8. Hastaya uygulandıktan sonra gerekirse tekrar aynı işlemleri yaparak cihaz hazır hale getir.

5.9. İşlem bittikten sonra cihazı temizle ve on/off düğmesinden kapat.

### 6. İlgili Dokümanlar

6.1. Cihaz Kullanım klavuzu

HAZIRLAYAN

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Süreç Sorumlusu

Kalite Temsilcisi

Başhekim