



## COBAS c 501 BAKIM ÇİZELGESİ

SERİ NO:..... AY:..... YIL:.....

GÜNLÜK BAKIM		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cihaz	İncubation Water Exchange																															
	Air Purge(ALL)																															
	Reagent Prime (REF)																															
	Photometer Check																															
	Cobas Link Essent. İnfö																															
Manuel	Numune Probu																															
	İSE Sipper Probu																															
	İSE Drain Port																															
	Reaktif Probu																															
	Cihaz Yüzeyi																															
Gün Sonu Bakımı	Air Purge(ALL)																															
	İSE Wash																															

340 nm <sup>2</sup> de Okunan "Photometer Check" Değerleri	Okunan Değer < 14.000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		Gün	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

<sup>1</sup> Dezenfektan ile temizleyiniz. Çamaşır suyu kullanmayınız.

<sup>2</sup> İlk aşamada alkol ile temizleyiniz. İkinci aşamada distile su ile ıslatılmış gazlı bezle alkolü uzaklaştırınız.



## COBAS c 501 BAKIM ÇİZELGESİ

HAFTALIK BAKIM		TARİH/PARAF				
Cihaz	Wash Reaction Parts <sup>3</sup>					
	Cell Blank					
Manuel	IS Bath <sup>4</sup>					

AYLIK BAKIM		TARİH/PARAF
Manuel	Küvet Değişimi	
	İnkübasyon Filtresi ve Banyosunun Temizliği	
	KCl Filtre Temizliği	
	Cell Detergent Filtre Temizliği	
	Cihaz Üzerindeki Filtrelerin Temizliği	

PROBLEM YAŞANDIĞINDA YAPILAN BAKIMLAR		TARİH/PARAF
Manuel	Fotometre Lamba Değişimi <sup>5</sup>	
	Reaktif Probu Değişimi	
	Numune Probu Değişimi	

<sup>3</sup>Cihazda iki adet NAOH kaseti olmalıdır.

<sup>4</sup>Disitle su ile temizleyiniz.

<sup>5</sup>Fotometre lambası değişimi cihazın çalışma süresine (rutin/acil lab.) göre değişir. Fotometre lambasının ömrü ortalama 31 gündür(750 saat).