



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI
COBAS e 601 CİHAZI ÇALIŞMA TALİMATI

Doküman No: OE-BK-PR-001/ TL-004
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Tümör marker ve hormon testlerinin doğru çalışmasını sağlamak

2. Kapsam

Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı

3. Sorumlular

Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı çalışanları

4. Uygulama

4.1. COBAS E 601 Cihazı Çalıştırılması

4.1.1. Bilgisayarı açıp, medin 3.2 programı çalıştırılır.

4.1.2. Menü ekrana geldiğinde cihaz açılır.

4.1.3. Daily maintenance menüsünden günlük açılış seçilerek günlük açılış yapılır.

4.1.4. Azalan Reaktifler miadları kontrol edilerek cihaza yüklenir.

4.1.5. QC(Kontrol) menüsünden kontroller seçilir.

4.1.6. Kontrol serumları raklara ekranda gösterildiği şekilde yerleştirilir.

4.1.7. Solüsyon bidonları ekranda görüldüğü şekilde doldurulur.

4.1.8. Çalışmayı başlatın.

4.1.9. Çalışma tamamlandığında, test sonuçları otomasyon sistemine aktarılır, işi biten reaktifler ve numuneler çıkarılır.

4.1.10. Daily maintenance menüsünden günlük kapanış seçilerek kapatma işlemi başlatılır..

4.1.11. Program kapatılır.

4.1.12. Cihaz kapatılır.

4.1.13. Çalışma sırasında cihaz içinde kirlenme olduysa nemli bir bez ile temizlenir.

5. İlgili Dokümanlar

5.1. Cihaz Kullanma Klavuzu

HAZIRLAYAN

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM