



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI
COBAS C501 CİHAZI ÇALIŞMA TALİMATI

Doküman No: OE-BK-PR-001/ TL-005
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Biyokimya testlerinin doğru çalışmasını sağlamak

2. Kapsam

Tıbbi Biyokimya laboratuvarı

3. Sorumlular

4. Tıbbi Biyokimya laboratuvarı

5. Uygulama

5.1. Cobas C501 cihazı çalıştırılması

5.1.1. Bilgisayarı açıp, medin 3.2 programı çalıştırılır.

5.1.2. Menü ekrana geldiğinde cihazı açılır.

5.1.3. "utility" menüsünden 'Günlük Açılış' seçilerek yıkama yaptırılır.

5.1.4. Azalan Reaktifler miadları kontrol edilerek cihaza yüklenir.

5.1.5. QC (Kontrol) menüsünden kontroller seçilir.

5.1.6. Kontrol serumları ve ISE kalibratörleri raklara yerleştirilip cihaza yüklenir.

5.1.7. Solüsyon bidonlarını doldurulup, çalışma başlatılır.

5.1.8. Çalışma tamamlandığında, test sonuçları otomasyon sistemine aktarılır ve printerden sonuçlar otomatik alınır, işi biten reaktifler ve örnekler çıkarılır.

5.1.9. Gün sonunda tüm testler çalışıldıktan sonra özel rakına (yeşil) yıkama solüsyonları konularak cihaza yüklenir.

5.1.10. "Utility" kısmından "Günlük kapanış" seçilerek yıkama yaptırılır.

5.1.11. Program kapatılır.

5.1.12. Cihaz kapatılır.

5.1.13. Çalışma sırasında cihaz içinde kirlenme olduysa nemli bir bez ile temizlenir.

6. İlgili Dokümanlar

6.1. Cihaz Kullanma Klavuzu

HAZIRLAYAN

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM