



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI
KOAGÜLASYON CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No: OE-BK-PR-001/TL-006
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Koagülasyon testlerinin (PT, aPTT, Fibrinojen) doğru çalışmasını sağlamak.

2. Kapsam

Tıbbi Biyokimya laboratuvarı Koagülasyon cihazını kapsar.

3. Sorumlular

4. Tıbbi Biyokimya laboratuvarı

5. Uygulama

5.1. Koagülometre Cihazının Çalıştırılması

5.1.1. Koagülometre cihazı açma kapama anahtarından açılır.

5.1.2. Reaktifler miadları kontrol edilerek cihaza yüklenir

5.1.3. Kuyucuktaki küvetler kontrol edilir.

5.1.4. Yüksek ve düşük kontrol serumları hasta örnekleri çalışılır gibi çalışılır.

5.1.5. Kontroller normal değerler arasında ise hasta örnekleri çalışılmaya başlanır.

5.1.6. Kontroller normal değerler arasında değil ise cihaz kalibrasyonu için teknik servis aranır.

5.2. PT, aPTT Fibrinojen Çalışması

5.2.1. Numunelerimiz kendi özel tüplerinde yaklaşık 10 dk. 4000 devirde döndürülür.

5.2.2. Bakılacak test sayısı kadar özel hazırlanmış küvetler yerleştirilir.

5.2.3. Çalışma yapılacak numuneler yarı otomatik cihaza konulur ve sırasıyla barkodu okunduktan sonra testine göre çalışma yapılır.

5.2.4. Atık bidonu dolu ise çamaşır suyu (1lt atık sıvıya 50 ml çamaşır suyu) / klor tablet (1 lt atık sıvıya 4 mg klor tablet) ile nötrölize edilerek lavaboya boşaltılır.

5.2.5. Çıkan sonuçlar otomasyon sistemine aktarılır.

5.2.6. Otomasyondaki veriler kontrol edilerek onaylanır.

6. Dış Kaynaklı İlgili Doküman

6.1. Cihaz kullanma kılavuzu

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
SÜREÇ SORUMLUSU	KALİTE TEMSİLCİSİ	BAŞHEKİM