



**İÜ**  
**ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ**  
**TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI**  
**SEDİMENTASYON CİHAZI KULLANIM TALİMATI**

Doküman No: OE-BK-PR-001/TL-007  
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017  
Revizyon No : 00  
Revizyon Tarihi :  
Sayfa No : 1 / 1

**1. Amaç**

Sedimentasyon cihazının doğru kullanılması.

**2. Kapsam**

Tıbbi Biyokimya laboratuvarı

**3. Sorumlular**

Tıbbi Biyokimya laboratuvarı çalışanları.

**4. Uygulama**

**4.1.** Kan alınan siyah kapaklı (vakumlu) sedimentasyon tüpleri en az 5 dakika mikserde döndürülür.

**4.2.** Cihazın açma düğmesinden cihaz açılır.

**4.3.** Kan seviyesinin tüpün iki çizgisinin arasında olmasına dikkat edilir, eğer miktar fazlaysa seviye iki çizginin arasına gelinceye kadar enjektörle çekilir.

**4.4.** Ekranı Ana Menü gelince sedimentasyon tüpleri cihazın içindeki kuyucuklara barkodları okutulduktan sonra sırayla yerleştirilir.

**4.5.** Testler bittiğinde cihaz ekranda uyarı verir ve çıkan sonuçlar otomasyon sistemine aktarılır.

**4.6.** Çalışma bitiminde tekrarı istenen numuneler cihaza yüklenerek okuma tekrarlanır.

**4.7.** Ölçümleri biten tüpler gün sonunda tıbbi atık bidonlarına “ **Çevre ve Atık Yönetimi Talimatı**” na göre atılır.

**5. İlgili Dokümanlar**

**5.1.** Çevre ve Atık Yönetimi Talimatı

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
SÜREÇ SORUMLUSU	KALİTE TEMSİLCİSİ	BAŞHEKİM