



**İÜ**  
**ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ**  
**TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVAR**  
**GAİTADA GİZLİ KAN TESTİ ÇALIŞMA TALİMATI**

Doküman No:OE-BK-PR-001/TL-010  
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017  
Revizyon No :00  
Revizyon Tarihi :  
Sayfa No : 1 / 1

### 1. Amaç

Gaitada gizli kan testinin doğru yapılmasını sağlamak.

### 2. Kapsam

Gaitada gizli kan testi

### 3. Sorumlu

Laboratuvar teknisyeni

### 4. Uygulama

4.1. Miadı kontrol edilmiş malzemeler ve numuneler oda sıcaklığına getirilir.

4.2. Gaita numunesi temiz ve kuru bir kap içine alınmış olmalıdır.

4.3. Numune toplama çubuğu gaita numunenin birkaç değişik bölgesine batırılır.

4.4. Çubuk üzerinde bulunan numune fazlasını alınıp, çubuk içinde buffer bulunan tüpün içine konular ve kapağı sıkıca kapatılarak karıştırılır.

4.5. Bu karışımdan 2 damla test çubuğunun numune bölgesine damlatılır.

4.6. 5 dakika içinde test çubuğunun sonuç bölgesinden sonuç okunur.

4.7. İşlem bittikten sonra kullanılan numuneler dikkatli bir şekilde tıbbi atık çöpüne “ **Çevre ve Atık Yönetimi Talimatı**” na göre atılır

4.8. Sonuçlar negatif ya da pozitif olarak verilir.

### 5. İlgili Doküman

5.1 Çevre ve Atık Yönetimi Talimatı

HAZIRLAYAN

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM