



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVAR
TAM İDRAR TAHLİLİ ÇALIŞMA TALIMATI

Doküman No: OE-BK-PR-001/TL-011
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Tam idrar tahlili (TİT) incelemesinin yapılmasını düzenlemek.

2. Kapsam

TİT işlemleri

3. Sorumlu

Laboratuvar teknisyeni

4. Uygulamalar

- 4.1. İşlemlerini tamamlamış halde gelen hastaya; temiz ve kuru plastik bardak (barkodlu) verilerek idrar numunesi getirmesi istenir.
- 4.2. Otomatik idrar cihazı açılır.
- 4.3. İdrar numuneleri, çalışma tezgahına dizilir.
- 4.4. Çalışacağımız numunenin barkodu cihaza okutulur.
- 4.5. İdrar bardakların üzerlerine birer adet miadı kontrol edilmiş strip daldırılır.
- 4.6. Strip cihaza yüklenir ve cihaz "start" tuşuna basılarak çalıştırılır.
- 4.7. Cihazın hazırlayıp otomasyon sistemine gönderdiği sonuç kontrol edilerek onaylanır.
- 4.8. İşlem bittikten sonra kullanılan numuneler "**Çevre ve Atık Yönetimi Talimatı**" na göre atılır.

5. İlgili Doküman

- 5.1. Çevre ve Atık Yönetimi Talimatı

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
SÜREÇ SORUMLUSU	KALİTE TEMSİLCİSİ	BAŞHEKİM