



**İÜ**  
**ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ**  
**TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI**  
**OTOMATİK İDRAR ANALİZ CİHAZI KULLANIM TALİMATI**

Doküman No: OE-BK-PR-001TL-015  
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017  
Revizyon No : 00  
Revizyon Tarihi :  
Sayfa No : 1 / 1

**1. Amaç**

Otomatik idrar analiz cihazının doğru kullanılması.

**2. Kapsam**

Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı

**3. Sorumlular**

Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı çalışanları.

**4. Uygulama**

**4.1.** Cihazın açma-kapama düğmesinden cihaz açılır.

**4.2.** Cihazın kendini kalibre etmesi beklenir.

**4.3.** Kullanılacak olan sribin miadı kontrol edilir, uygun değilse gerekli kişi bilgilendirilir.

**4.4.** Çalışılacak numunenin barkodu okutulur.

**4.5.** İdrar bardakların üzerlerine birer adet miadı kontrol edilmiş strip daldırılır.

**4.6.** Strip cihaza yüklenir ve cihaz "start" tuşuna basılarak çalıştırılır.

**4.7.** Cihazın hazırlayıp otomasyon sistemine gönderdiği sonuç kontrol edilerek onaylanır.

**4.8.** Gün sonunda cihaz açma-kapama düğmesinden kapatılır.

HAZIRLAYAN

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM