



## İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MAMMOGRAFI CİHAZI ACİL DURUM PLANI

### YANGIN DURUMUNDA TEHLİKE PLANI

1. Cihazın ışınlamasını durdurun. Bu işlem sırasında sadece ışın kesilmeli, sistemin elektriği kesilmemelidir. Aksi halde cihaza müdahale imkansız hale geldiğinden hasta masasını hareket ettirmek mümkün olamaz.
2. Hastayı odada çıkarın.
3. Cihazı kapatın.
4. Yangın alarmı düğmesine basarak binayı boşaltınız.
5. Eldeki yangın söndürücülerle yangına müdahale ederken yangının durumuna göre 110 No' dan itfaiyeyi arayın.
6. Sorumlu fizik uzmanları ve TAEK'e haber veriniz.

### DEPREM HALİNDE TEHLİKE PLANI

**Tüm çalışanlar deprem anında yapılacak işlemler konusunda eğitilmelidir.**

#### ***Deprem tedavisi sırasında olması halinde:***

1. Çalışan kişiler asla paniğe kapılmamalıdır. Işınlama hemen durdurulmalıdır. Işınlama süresi kaydedilmelidir. Bu işlem sırasında sadece ışın kesilmeli, sistemin elektriği kesilmemelidir. Aksi halde cihaza müdahale imkansız hale geldiğinden hasta masasını hareket ettirmek mümkün olamaz.
2. Hastaya sakin olmasını söyleyiniz.
3. Güvenli bir yerde sarsıntının geçmesini bekleyiniz.
4. Sarsıntı geçer geçmez hastayı tedavi odasından çıkarınız.
5. Cihazı kapatınız.
6. Sorumlu kişilere haber veriniz.
7. İlgili kişilerle hasar tespiti yapınız.
8. Bina hasar görmüşse itfaiye ve polisten yardım istenir.
9. Cihazın koruyucu zırhı hasar görmüşse TAEK' ten yardım istenir.
10. Herhangi bir hasar yoksa ilgili firma elemanlarıyla birlikte cihazın fiziksel parametreleri kontrol edilir.
11. Deprem sonrası ayrıntılı rapor hazırlanarak TAEK' e gönderilir.

#### ***Deprem tedavisi saatleri dışında meydana gelmesi halinde:***

1. Hasar tespiti yapılır.
2. Cihaza ait fiziksel parametreler kontrol edilir.
3. Durum TAEK'e bildirilir.

## **SU BASMASI DURUMUNDA TEHLİKE PLANI**

1. Su basması durumunda cihazı çalıştırmayınız.
2. Çalışır vaziyette iken su basarsa cihazı kapatınız. Elektriđi ana şalterden kesiniz. Hastayı dışarı çıkarınız.
3. Suyun boşaltılmasını takiben klinik teknik personeli ve yetkili firma elemanlarıyla birlikte cihazın kontrollerini yapınız.
4. Hasar tespiti yapınız ve rapor hazırlayınız.

## **MAMMOGRAFI CİHAZI ACİL DURUM PLANI**

1. Acil durumda hastayı sıkıştıran fren serbest bırakılır.
2. Cihazın yanında bulunan KIRMIZI acil buton düğmesine basılır.
3. Hasta odadan emniyetli bir şekilde çıkarılır.
4. Elektrik panosunda şalter OFF konumuna getirilir.
5. 5. Fizik Bölümüne haber verilir.

## **GEREKLİ TELEFONLAR**

A- İÜ Onkoloji Enstitüsü: 0212 414 24 34

Tesis sorumlusu: Prof. Dr. Ahmet KİZİR TEL: 0212 414 24 34 – 34001

B- Sorumlu radyoterapi fizikçileri: Tıbbi Radyofizik Uzmanı Hatice BİLGE TEL: 0212 414 24 34- 34145

C- TAEK : Radyasyon Güvenliđi Dairesi

D- TAEK 444 8 677

E- İtfaiye:110

F- Biomedikal : 23058