



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
RÖNTGEN CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No: OE-GS-PR-001 /TL-002
İlk Yayın Tarihi : 05.10.2017
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Bu talimatın amacı, İmago marka röntgen cihazının kullanım ve bakımına yönelik yöntem belirlemektir.

2. Kapsam

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyoloji Ünitesi'nde kullanılmakta olan İmago marka röntgen cihazının kullanım ve bakımını kapsar.

3. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Radyoloji Ünitesi'nde görevli tekniker ve teknisyenler, arızasının giderilmesinden Enstitü Müdürlüğü sorumludur.

4. Tanımlar

kV: kilovat

5. Uygulamalar

5.1. Cihazın Kullanımı:

- Röntgen makinesi kontrol paneli üzerindeki power düğmesine basılarak açılır.
- Power düğmesi yeşil olunca, uygun kV seçilerek makine çekime hazır hale getirilir.
- Çekim yapılacak bölgeye göre hastaya gerekli pozisyon verilir.
- Röntgen cihazı kontrol paneli üzerindeki gerekli dozlar seçilerek çekim tamamlanır.
- Çekilen film kasetleri CR film basma makinesinde okutulur. Yazıcı yardımıyla filme basılır ve hastaya teslim edilir.

5.2. Cihazın Bakımı :

- Röntgen cihazının elektrik bağlantısı kesilir.
- Cihazın ana gövdesi, masa üzeri,statif levhası ve kasetler nemli bir bezle temizlenir.
- Cihaza ait çekimlerde kullanılan aparat ve kasetler her inceleme sonrası dezenfekte edilerek bir sonraki inceleme için hazırlanır.

HAZIRLAYAN:

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN:

ONAYLAYAN:

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM