



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MAMMOGRAFI CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No: OE-GS-PR-001 /TL-003
İlk Yayın Tarihi : 05.10.2017
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Bu talimatın amacı, mammografi cihazının kullanımına yönelik yöntem belirlemektir.

2. Kapsam

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyoloji Ünitesi'nde kullanılmakta olan mammografi cihazının kullanım ve bakımını kapsar.

3. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Radyoloji Ünitesi'nde görevli tekniker ve teknisyenler, arızasının giderilmesinden Enstitü Müdürlüğü sorumludur.


4. Tanımlar

5. Uygulamalar

5.1. Cihazın Açma:

- Sigorta panelinden START düğmesine basılır.
- Cihaz üzerinde 1 düğmesine basıp 3 sn beklenir.
- Seno console log in: sdc yazıp enter tuşuna basılır.
- Password: Clinical yazıp, login tıklanır.
- Aws reset completed yazısına okey yazılır.
- Cihaz çalışır.

5.2. Cihazı Kapama:

- Ekranın en sağda altta  tıklanır.
- Okey tuşuna basılır.
- Cihaz kendini kapatır.
- Ekran kapandıktan sonra, sigorta panelinden STOP düğmesine basılır.

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
SÜREÇ SORUMLUSU	KALİTE TEMSİLCİSİ	BAŞHEKİM