



**İÜ**  
**ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ**  
**C KOLLU RÖNTGEN CİHAZI KULLANIM**  
**TALİMATI**

Doküman No: OE-GS-PR-001 /TL-004  
İlk Yayın Tarihi : 05.10.2017  
Revizyon No : 00  
Revizyon Tarihi :  
Sayfa No : 1 / 2

### 1. Amaç

Bu talimatın amacı, c kollu röntgen cihazının kullanımına yönelik yöntem belirlemektir.

### 2. Kapsam

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyoloji Ünitesi'nde kullanılmakta olan c kollu röntgen cihazının kullanımını kapsar.

### 3. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Radyoloji Ünitesi'nde görevli tekniker ve teknisyenler, arızasının giderilmesinden Enstitü Müdürlüğü sorumludur.

### 4. Tanımlar

### 5. Uygulamalar

#### 5.1. Cihazın Açma:

- Monitör servis masasının bağlantı kablosu C- kollu sistemine bağlayınız.
- Elektrik kablosunu prize takınız
- C kollu sistemini monitör servis masasında açınız. Sistem ön yükleme yapar.
- İşletim esnasında, pencere monitör servis masasında bulunan PATIENT REGISTRATION (HASTA KAYDI) ikon tuşuna bakarak ta açılır.
- Hasta kaydı ve hasta ile ilgili bilgiler yazıldıktan sonra EXAM (muayene) tuşuna basılır.
- Hasta bilgileri EXAMINATION görev kartında görülür.
- Cihaz işlem yapmaya hazırdır.
- Uygun tıbbi uygulama programı seçilir.
- Seçilen işlem modu sembol olarak gösterilir
- C-kollunun hazır olduğu durum çubuğunda gösterilir.
- Sağ ayak ile basılarak floroskopi yapılır.
- Ana menüde Patient>Save LSH Scane tuşuna basılarak kaydedilir.
- Ana menüde Patient>End Exam tuşuna basılarak işlem sonlandırılır.

#### 5.2. Cihazı Kapama:

- C kollu sistemin sıfır konuma taşınması ve orada bırakılması gerekir.
- Tüm frenler kilitlenir.

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
SÜREÇ SORUMLUSU	KALİTE TEMSİLCİSİ	BAŞHEKİM



**İÜ**  
**ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ**  
**C KOLLU RÖNTGEN CİHAZI KULLANIM**  
**TALİMATI**

Doküman No: OE-GS-PR-001 /TL-004  
İlk Yayın Tarihi : 05.10.2017  
Revizyon No : 00  
Revizyon Tarihi :  
Sayfa No : 2 / 2

- Üniteyi monitör servis masasında veya C-kollu sisteminden kapatınız.
- Görüntüleme sistemi uyku moduna geçirilir. Ekrandan OPTION > END SOFTWARE> SHOUT DOWN ile uyku moduna geçer. Tekrar işler hale gelmesi 45sn sürer.
- 13. Kez kapatıldığında sistem kendini otomatik kapar. Tekrar açılması 3 dakika sürer.
- Monitör servis masasının C- kollu ile bağlantısını kesiniz.
- Monitör servis masasının arkasındaki kabloları toplayınız.
- C-kollu taşınmaya hazırdır.

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
SÜREÇ SORUMLUSU	KALİTE TEMSİLCİSİ	BAŞHEKİM