



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
PATOLOJİ LABORATUVARI
ANALİTİK EVRE DOKU TAKIP CİHAZI KULLANMA TALİMATI

Doküman No: OE-PAT-PR-001/TL-006
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 2

1. Amaç

Patoloji Laboratuvarına gelen cerrahi işlemler ya da invazif/ noninvazif girişimler ile hastadan elde edilmiş doku örneği, ameliyat piyesi, hücre bloklarının fiksasyon, diseksiyon, kasetlenme işlemlerinden sonra parafin blok hazırlanması aşamasına gelebilmesi için hazırlanan solüsyonlardan belirlenen program dahilinde uygulamaya tabi tutulması

2. Kapsam

Patoloji laboratuvarı

3. Sorumlular

Laborant, Patolog/Patoloji asistanı

4. Uygulama

- 4.1. Her iş günü sonunda kasetlenen materyaller doku takip cihazının özel sepetine laborant tarafından yerleştirilir.
- 4.2. Bu sepet cihaz üzerinde bulunan özel bölmeye takılır.
- 4.3. Bölmenin takip sürecinin ilk solüsyonun üstünde olup olmadığı kontrol edilir. Eğer değil ise cihaz kumandasından 'Go to 1' tuşuna basılarak bölmenin doğru adıma gelmesi sağlanır.
- 4.4. Cihazın kumandasından 'Lower' tuşuna basılır ve sepet takip için gerekli ilk solüsyonun içine sokulur.
- 4.5. Sepeti taktıktan sonra bölmenin kapağı kapatılır.
- 4.6. Cihaz kumandasından her kurumda 'Reset' tuşuna basılarak makinanın program kontrolü yapılır.
- 4.7. Cihazın kurulduğu günün ertesi günü eğer iş günü ise 'delay on' tuşuna basılarak cihazın günlük kurumu tamamlanmış olur.
- 4.8. Cihazın kurulduğu günün ertesi günü eğer iş günü değil ise önce 'delay on' tuşuna basılır, daha sonra 'days delay' tuşuna basılarak kaç gün resmi tatil/haftasonu ise gün sayısı tuşlanır ve tatil günlerine göre cihazın kurumu tamamlanmış olur.
- 4.9. Cihazın çalışmaya başlama saati sabit olarak kumandaya işlenmiştir ve bu saat 17:20 olarak ayarlanmıştır.
- 4.10. Bu sabit başlangıç saatini değiştirmeyi gerektiren bir durum olduğunda cihazın kumandası üzerinde 'manual' tuşuna basılır, sonra 'clock' tuşuna basılarak istenilen saate ayarlanır.

HAZIRLAYAN:

GÖZDEN GEÇİREN:

ONAYLAYAN:

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
PATOLOJİ LABORATUVARI
ANALİTİK EVRE DOKU TAKİP CİHAZI KULLANMA TALİMATI

Doküman No: OE-PAT-PR-001/TL-006
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 2 / 2

- 4.11.** Cihazın çalışmasının bitiş saati sabah 06.00'dir. Bu saate kadar sepet 12 farklı solüsyondan geçerek işlemini bitirir.
- 4.12.** Cihazın çalışması bittikten sonra 'Raise' tuşuna basılarak sepetin yukarı çıkması sağlanır.
- 4.13.** Sepet bölmesinin kapağı açılarak sepet dışarı alınır ve kapak kapatılır.
- 4.14.** Cihaz iş günü sonunda kurulana kadar bu adımda bekler.
- 4.15.** Cihazda bulunan 12 farklı solüsyonun seviyelerinin takibi, cihaz kumandası üzerinde bulunan 'Rotate' tuşuna basılarak her gün bir kez kontrol edilir.
- 4.16.** Herhangi bir arızadan ötürü cihaz alarm verir ise 'cancel alarm' tuşuna basılır ve ilgili firma aranarak sorunun giderilmesi için çağrılır.
- 4.17.** Solüsyonların değişim zamanları takibe alınan kaset sayısına göre değerlendirilir. 300 kaset takibinden sonra ya da en az iki haftada bir değiştirilir. Değişim "**Patoloji Laboratuvarı Doku Takip Cihazı Solüsyonları İzlem Formu**" ile kayıt altına alınır. Kayıtlar arşivde saklanır.

5. İlgili Dokümanlar

- 5.1.** Patoloji Laboratuvarı Doku Takip Cihazı Solüsyonları İzlem Formu

HAZIRLAYAN:	GÖZDEN GEÇİREN:	ONAYLAYAN:
SÜREÇ SORUMLUSU	KALİTE TEMSİLCİSİ	BAŞHEKİM