



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
PATOLOJİ LABORATUVARI MAY-GRÜNVALD
GIEMSA (MGG) BOYAMA TALİMATI

Doküman No: OE-PAT-PR-002/ TL-017
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Bu talimat, May-Grünwald Giemsa (MGG) Boyama işlemlerinin nasıl yapılacağını tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu talimat MGG boyama işlemlerini kapsar.

3. Sorumlular

Sitoteknolog, Laborant

4. Uygulamalar

- 4.1. Havada kurutulan lamlar 5 dakika May Grünwald boyasında bekletilir.
- 4.2. Lamlar suda yıkanır.
- 4.3. 20 dakika, önceden hazırlanmış %10'luk Giemsa boyasında tutulur.
- 4.4. Sonrasında suda yıkanarak spora dizilir.
- 4.5. Gazlı bezle altları silinir ve havada kurutulur.
- 4.6. Ksilolden geçirilerek kapatma işlemi uygulanır.
- 4.7. Sitolojik materyallerin boyasında kullanılan stok solüsyonlar bittiği zaman sitoteknolog veya laborant tarafından yeniden hazırlanır.

HAZIRLAYAN:

GÖZDEN GEÇİREN:

ONAYLAYAN:

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM