



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
PHİLİPS BRİLLANCE BİGBORE BT-SİM
CİHAZLARI KULLANIM TALİMATI

Doküman No : OE-RT-PR-001/TL-005
İlk Yayın Tarihi : 05.10.2017
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Bu talimat, Enstitümüzde Philips Brillance bigbore BT-Sim Cihazında çalışan personelin bu cihazları en doğru şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu talimat, enstitümüzde bulunan Radyoterapi Cihazlarını kapsar.

3. Sorumlular

Sağlık Fizikçisi, ilgili teknisyenler

4. Uygulama

4.1. Philips Brillance bigbore BT-Sim Cihazının Kullanımı

4.1.1. Açılış

- Monitör açık duruma getirilir.
- IRS bilgisayarı açılarak iki ışığın yanması beklenir (Siyah Kasa).
- HOST isimli bilgisayar açılır (Gümüş Kasa).
- Kullanıcı: ct
- Şifre: YES
- Ekranda ki Philips kullanım sözleşmesi onaylanır.
- Masa yüksekliği ve diğer opsiyonların bulunduğu paneldeki anahtar 1. konumundan 3. konuma getirilir daha sonra anahtar 2. konuma gelmesi beklenir.
- Ekranı gelen pencere de YES butonuna tıklanır.
- Masa istenilen yükseklik ve gereken mesafede gantriye yaklaştırılır.
- HOME linki tıklanır ve TUBE CONDITIONING kısmına girilir. Tüm uyarılarda OK tıklanır.
- İşlem başladıktan sonra gereken 3 dakikadan sonra makine kullanıma hazır.

4.1.2. Kapanış

- Masa yüksekliği ve diğer değerlerin bulunduğu panel anahtar çevrilerek kapatılır (0 konumuna getirilir).
- "Home" kısmına girip "Logout" tıklanır.
- "Yes" kısmına tıklanır.
- "Shut Down" kısmına tıklanır.
- "Ok" kısmı tıklanır.
- IRS kasasının düğmesine basarak iki yeşil ışığın da sönmeye beklenir.
- Yeşil ışıklar sönmeye makine tamamen kapanmış demektir (Siyah kasa).

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
SÜREÇ SORUMLUSU	KALİTE TEMSİLCİSİ	BAŞHEKİM